


PID: 299-4

UID: 299-4

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:23



OSOCZE REFERENCYJNE VON WILLEBRANDA, Z NIEDOBOREM

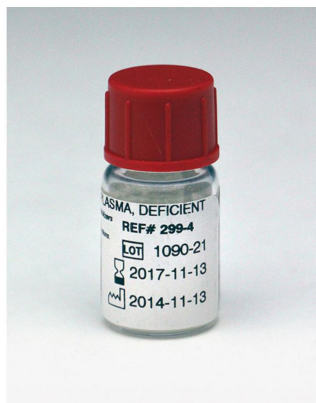

OPIS OGÓLNY

Osocze referencyjne von Willebranda z niedoborem kofaktora rystocetyny. Uzyskane od ludzi z wrodzonym syndromem von Willebranda i zawiera mniej niż 30% normalnej aktywności kofaktora rystocetyny, 0,5 mL, liofilizowane. Rozpuścić w 0,5 mL destylowanej wody. Pozostawić przez 10 minut w temp. pokojowej od czasu do czasu mieszając. Należy się upewnić czy wszystkie części są dobrze rozpuszczone. Stabilne przez 4h w temp. 2-8°C po rozpuszczeniu lub przez 30 dni w temp. - 20°C.

MODELE

▪ 299-4

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl