

PID: 393

UID: 393

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:20



EPINEFRYNA



OPIS OGÓLNY

Stężenie: 10 mM (krew pełna), 1 mM (PRP)

Dostarczony jako: Liofilizat 1-epinephrine bitartrate ze stabilizatorami

Przygotowanie: Rozpuścić w 5 mL sterylnej wody destylowanej dla testów w krwi pełnej. Rozcieńczyć 1:10 solą fizjologiczną dla testów PRP. Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia przez 10 minut od czasu do czasu delikatnie mieszając

Przechowywanie i trwałość: Liofilizat - w temp. 2-8°C; Rozpuszczony reagent - 3 miesiące w temp. - 70°C w ciemni rozporcjowany po 100 uL; Stężenie robocze - 8h w temp. 2-8°C w ciemni

Zalecane objętości: Krew (rozporcjowana/nierozporcjowana) Dodać 5 uL rozpuszczonego reagentu do 1 mL próbki aby uzyskać końcowe stężenie 50 mM; PRP: Dodać 5 uL rozcieńczonego reagentu w stosunku 1:10 do 500 uL próbki aby uzyskać końcowe stężenie 10 uM

MODELE

▪ 393

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl