


PID: 385

UID: 385

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:20



KOLAGEN 1 MG/ML

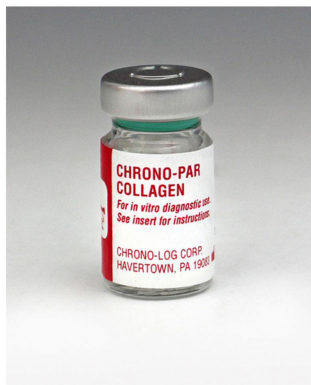

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Każda fiolka zawiera 1 mg włókien kolagenowych (typ I) ze ścięgien koniowatych zawieszonych w izotonicznym roztworze glukozy o pH 2,7 (500-1000 oznaczeń).

Stężenie: 1 mg/mL

Dostarczony jako: Włókna kolagenowe (typ I) ze ścięgien koniowatych w izotonicznym roztworze glukozy o pH 2,7

Przygotowanie: Może być bezpośrednio używany. Fiolkę należy kilkakrotnie kołysać lub odwirować w celu rozpuszczenia włókien kolagenowych. NIE ZAMRAŻAC! W razie potrzeby kolagen można rozpuścić w izotonicznym roztworze glukozy o pH 2,7

Przechowywanie i trwałość: W formie dostarczonej - temp. 2-8°C; Rozporcjowany odczynnik: 1 tydzień w temp. 2-8°C pod parafilmem

Zalecane objętości: Krew (rozcieńczona i nierozcieńczona): Dodać 2 ?L odczynnika do 1 mL próbki aby uzyskać stężenie końcowe 2 ?g/mL PRP: Dodać 1 ?L reagentu do 500 ?L próbki aby uzyskać stężenie końcowe 2 ?g/mL

MODELE

▪ 385

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl