


PID: 384

UID: 384

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:20



ADP 1 MM

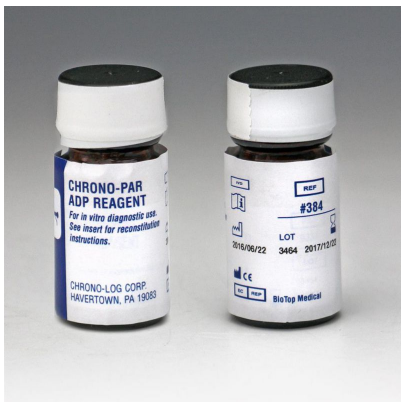

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Stężenie: 1 mM

Dostarczony jako: 2,5 mg liofilizowanego difosforanu adenyzy

Przygotowanie: Rozpuścić w 5 mL jałowej soli fizjologicznej. Pozostawić do rozpuszczenia przez 10 minut od czasu do czasu mieszając

Przechowywanie i trwałość: Liofilizat - w temp. $<0^{\circ}\text{C}$; Rozpuszczony reagent - 1 rok lub do daty ważności w temp. -70°C , rozporcjowany; Stężenie robocze - 8h w temp. $2-8^{\circ}\text{C}$

Zalecane objętości: Krew (rozcieńczona/nierozcieńczona): Dodać 10 μL reagentu do 1 mL próbki aby uzyskać stężenie końcowe 10 μM ; PRP: 5 μL reagentu do 500 μL próbki aby uzyskać stężenie końcowe 10 μM

MODELE

▪ 384

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl